



Gracias por su compra.
 SMART-STEP LE PROPORCIONARÁ
 AÑOS DE SERVICIO. ESTÁ HECHO
 CON LOS MATERIALES DE MAYOR CALIDAD
 Y HA SIDO PROBADO
 POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE
 PARA UNA LARGA VIDA, SOLIDEZ
 Y RENDIMIENTO.

¡PRECAUCIÓN!

Aunque su bastón no es completamente impermeable, el tubo de luz en la parte inferior del bastón lo es. Sin embargo, no exponga su bastón al agua u otros líquidos. Una exposición típica a la lluvia no dañará el bastón. Seque el bastón en caso de lluvia o nieve. Limpie el bastón según sea necesario con un paño limpio y húmedo. No use agentes de limpieza con alcohol o detergentes.

PARA UN MEJOR RENDIMIENTO
 Y VIDA DE LA BATERÍA,
 POR FAVOR CARGUE EL BASTÓN
 DURANTE AL MENOS 8 HORAS
 ANTES DEL PRIMER USO.


BIENVENIDO A SU GUÍA DE INICIO RÁPIDO SMARTSTEP™
 POR FAVOR, LEA ESTA GUÍA ANTES DE CONTINUAR

CARACTERISTICA PRINCIPAL

- ① AGARRE ANTIMICROBIANO
- ② LUZ MANUAL: PRESIONE PARA 30 SEGUNDOS/
MANTENGA PRESIONADO PARA ENCENDER
- ③ INTERRUPTOR DE LINTERNA
- ④ INTERRUPTOR DE LINTERNA DE EMERGENCIA
- ⑤ LUZ PILOTO: DESTELLA PARA RECARGA
- ⑥ INTERRUPTOR DE SELECCIÓN
DE COLOR ROJO/APAGADO/BLANCO
- ⑦ LÁMPARA DE LINTERNA Y SENSOR DE LUZ
- ⑧ PUERTO DE CARGA
- ⑨ SEGURIDAD DE CLUTCH PARA AJUSTE DE LONGITUD
- ⑩ TUBO DE LUZ PARA LUZ PRINCIPAL: ROJO O BLANCO
- ⑪ PUNTA DE BASTÓN CON PATENTE ANTIDESLIZANTE

Ajustar la longitud:

- 1- Aflojar el embrague
- 2- Presionar y mantener presionado el botón
- 3- Girar/deslizar la parte inferior del bastón a la nueva longitud
- 4- Apretar el embrague

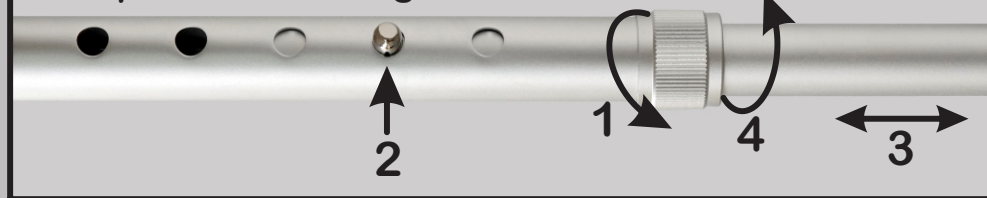

AVISO DE PATENTE: ESTE PRODUCTO ESTÁ PROTEGIDO POR PATENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EN EL EXTRANJERO. SMART STEP ES UNA MARCA REGISTRADA DE SMART MEDICAL DEVICES, L.L.P.

